

SEPTALDEIDE

Αντισηπτικό συμπυκνωμένο με άρωμα λεμόνι

Σύνθεση:	Aldeide glutarica g 2 tensioattivo non ionico g 2 essenza di limone antiossidante e acqua deionizzata q.b. a g 100.
Μορφή : Άρωμα: pH:	Liquido di colore blu Limon e caratteristico dell'aldeide 3,0 – 5,5
Βιοαποσύνθεση: Τοξικότητα:	Oltre il 90% DL50 per os nel topo = 15 ml/kg
Συσκευασία:	- Φιάλη του 1 lt σε συσκευασία των 12 - Φιάλη των 5 lt σε συσκευασία των 4
Ιδιότητες και ενδείξεις:	<p>Η Αλδεΐδη glutarica είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στα βακτηρίδια, μύκητες, ιούς gram + and gram -, σπόρους, (αποτελούμενη το HIV ιών, AIDS, του ιού HBV, ηπατίτιδα Β και ιού HCV, αιτία της ηπατίτιδας Γ). Ο χρόνος δράσης της πλήρης είναι 10 ώρες.</p> <p>Η SEPTALDEIDE είναι αποτελεσματική στην παρουσία αίματος και πρωτεϊνών.</p> <p>Με εξαίρεση άλλη περιέχουσα γλουτανική αλδεΐδη, (SEPTALDEIDE), όντας ενεργή, δεν απαιτείτε ενεργοποιητής για να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί.</p> <p>Η SEPTALDEIDE συντηρείται σε ψυχρό μέρος καλά κλεισμένη η συσκευασία για 18 έως 24 μήνες, Μόλις ανοιχτεί το προϊόν διατηρεί τα προτερήματά του για 28 ημέρες.</p> <p>Η SEPTALDEIDE είναι έτοιμη στη χρήση και αποστείρωση για: χειρουργικά μέταλλα, διαγνωστικά εξεταστικά ενδοσκοπικά εργαλεία, εξοπλισμό αιμοκάθαρσης, ενδοτραχικά λάστιχα, γυαλί, πλαστικό, ασάλι, σωλήνες συνδέσμων, κάνουλες.</p>
Εφαρμογή:	<p>Η SEPTALDEIDE χρησιμοποιείται αραιωμένη (200ml ανά lt) για 10 ώρες. Πριν την χρήση των εργαλείων ξεπλύνουμε με αποστειρωμένο νερό.</p> <p>Για γρήγορη αποστείρωση αναραιώτη η SEPTALDEIDE για 10 λεπτά, μόνο για εργαλεία που ΔΕΝ περιέχουν αίμα και πρωτεΐνες. Πριν την χρήση των εργαλείων ξεπλύνουμε με αποστειρωμένο νερό.</p>

Πληροφορίες από εξειδικευμένο προσωπικό

ΙΑΤΡΙΚΑ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
Tel: +30 2610 425205

Fax: +30 2610 425006

mail: leonil@leonil.gr

web: www.leonil.gr